


Kezelési utasítás







INTERFÉSZ RÉSZEI


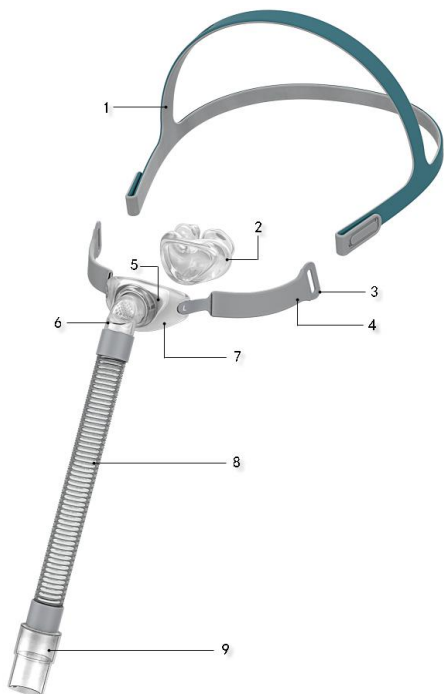


- | | | | |
|---|---------------|---|--|
| 1 | Fejpánt | 2 | Orrpárnák
(elérhető S, M, L méretekben) |
| 3 | Panel | 4 | Puha szíjak |
| 5 | Rögzítőkapocs | 6 | Könyök |
| 7 | Váz | 8 | Rövid cső |
| 9 | Csukló | | |




Felhelyezés

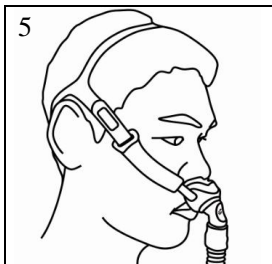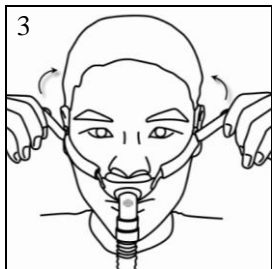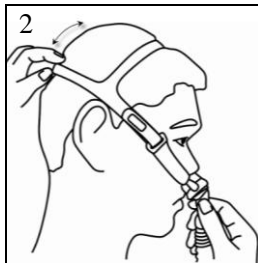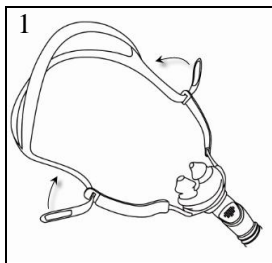

Szét szerelés

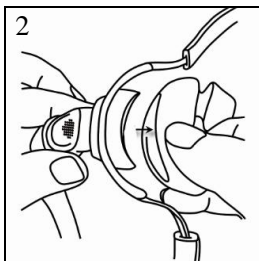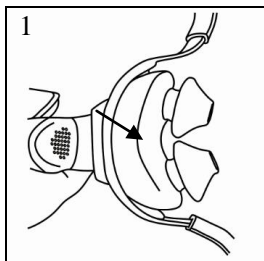

Összeszerelés

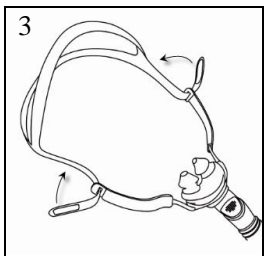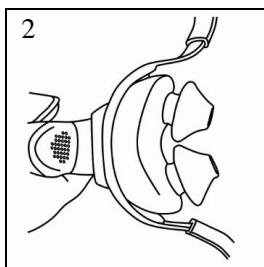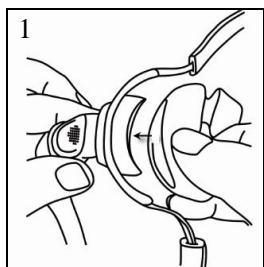

P2 Orrpárna interfész

Köszönjük, hogy a BMC P2 orrpárna interfészt választotta. Az orrpárna interfész könnyű, rugalmas és csendes. Úgy tervezték, hogy csak minimálisan érintkezzen arcával, így biztosítva azt, hogy kényelmesen érezze magát a terápia során. Ez a felhasználói kézikönyv tartalmaz, minden olyan szükséges információt, amelyre szüksége lehet a interfész helyes használatához.

A interfész nem tartalmaz természetes gumi latexet.

Rendeltetészerű használat

A P2 orrpárna interfész nem invazív módon vezeti a levegőt a beteghez egy pozitív légúti nyomást biztosító készülékből, amely lehet folyamatos pozitív légúti nyomást (CPAP) vagy kétszintű pozitív légúti nyomást biztosító (BiPAP) készülék.

A P2 orrpárna interfész:

- Olyan felnőtt betegek (> 66 lb / 30 kg) általi használatra tervezték, akik számára pozitív légúti nyomás terápiát írtak elő.
- Rendeltetése szerint alkalmazható egyetlen beteg által ismételt jelleggel otthoni környezetben, valamint több betegnél ismételt jellegű felhasználással kórházi / intézményi környezetben.

***FIGYELEM:** Az Amerikai Egyesült Államokban a szövetségi törvények értelmében a készülék kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre árusítható.*

Ellenjavallatok

Ezt a interfész az alábbi kórállapotokban szenvedő betegek esetén körültekintően kell alkalmazni:

- Arc deformitás.
- Sérült arcbőr, amely a interfész érintkezésbe kerül annak használata során.

A interfész használatát megelőzően



FIGYELMEZTETÉSEK

- Ez a interfész kizárólag a szakorvos vagy a légzésterapeuta által javasolt (CPAP vagy BiPAP) légáram-generátorokkal használható. A interfész a légáram-generátor bekapcsolása nélkül és annak nem megfelelő működése esetén nem szabad használni. A szellőzőnyílásokat sohasem szabad elzárni.
- **A figyelmeztetés magyarázata:** A CPAP és BiPAP készülékek rendeltetésszerű használata speciális maszkokat (vagy csatlakozókat) igényel, amelyek rendelkeznek szellőzőnyílásokkal (csatlakozókönnyökön található) amik lehetővé teszik a levegő folyamatos kiáramlását az interfészből. Amikor a légáram-generátor be van kapcsolva és megfelelően üzemel, akkor a légáram-generátorból érkező friss levegő a csatlakoztatott kilégzőnyíláson keresztül kifújja a kilélegzett levegőt. Azonban, ha a légáram-generátor nem üzemel (pl. áramszünet), akkor a interfész keresztül nem jut elegendő friss levegőhöz, és a kilélegzett levegőt újra belélegezheti. Ilyen esetben, a P2 orrpárna interfészt azonnal le kell venni.
- Alacsonyabb interfész nyomás esetén a kiáramló légáram alacsonyabb (lásd a "Műszaki specifikációk" részben a Nyomás-légáram görbe részt). Amennyiben a interfész nyomása

a kilégzés alatt túl alacsony, akkor lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre elegendő kilégzési szellőztető légáram ahhoz, hogy a kilélegzett levegőt szállító vezetékkel teljesen átöblítse a következő belégzés kezdete előtt.

- Amennyiben gyakorta észlel orrirritációt a interfész használata során, akkor szüntesse be annak használatát és konzultáljon kezelőorvosával.
- Amennyiben oxigént használ a légáram-generátorral, akkor az oxigén áramot ki kell kapcsolni ha a légáram-generátor nem üzemel. A figyelmeztetés magyarázata: Ha a légáram-generátor nem üzemel, és az oxigén áramlás bekapcsolva marad akkor a szellőző vezetékbe szállított oxigén felhalmozódhat a légáram-generátor készülékházában. A légáram-generátor készülékházában felgyülemlt oxigén tüzet okozhat. Ez a figyelmeztetés érvényes a légáram-generátorok legtöbb típusára.
- Kérjük tartózkodjon a dohányzástól oxigén használata esetén.

Interfész részei

1	Fejpánt	2	Orrpárnák (elérhető S, M, L méretekben)
3	Panel	4	Puha szíjak
5	Rögzítőkapocs	6	Könyök
7	Váz	8	Rövid cső
9	Csukló		

Felhelyezés

1. Fűzze át a fejpánt két oldalsó szíját a panelen lévő nyílásokon egyenként, majd rögzítse azokat visszahajtva.
2. Helyezze a fejpántot a feje köré, oly módon, hogy a hátsó szíjat megragadva azt feje hátsó része köré igazítja. A felső szíjnak kényelmesnek kell elhelyezkednie a feje tetején.
3. Állítsa be egyformán mindkét oldalsó szíjat úgy, hogy a interfész kényelmesen felfeküdjön az orra alá. Helyezze vissza a rögzítőfüleket.
4. Távolítsa el az interfészt az arcától, majd helyezze vissza, hogy az kényelmesen illeszkedjen. Győződjön meg arról, hogy az orrpárna interfész megfelelően illeszkedik az orrlyukaiba és mindkettő felfelé áll-e.
5. Végül csatlakoztassa a interfész csővezetékének végét készüléke légvezetékéhez. A interfész felhelyezésre került és használatra kész.

Megjegyzések: A részletes beállításokat és az üzemeltetésre vonatkozó információkért, lásd légáram-generátorának kézikönyvét.

Az orrpárna interfész három különféle méretben (S, M, L) kapható, tartsa az orrpárnákat az orrlyukaihoz és győződjön meg arról, hogy a párna mérete (pl.: M) megfelelően illeszkedik.

Amennyiben levegőszivárgást észlel, akkor a jobb tömítettség érdekében igazítsa meg az interfészt változtatva az orrpárna szögén. Amennyiben nem képes a szivárgást megszüntetni, akkor másik méretű orrpárnára van szüksége.

Eltávolítás

A P2 interfész eltávolításához, húzza az orrpárnákat el az orrától és vegye le a fejpántot a fejről. A fejpánt szíjait nem szükséges meglazítani.

Szétszerelés

1. A interfész lévő rövid cső megragadásával, nyomja össze és húzza le az orrpárnákat a interfész vázán lévő rögzítőkapocsról.
2. Távolítsa el a fejpántot az interfészről.

Megjegyzések:

- *A rövid csövet nem lehet szétszerelni.*
- *Ne húzza meg a rövid csövet vagy a légáram-generátor csövet, mivel azok megsérülhetnek.*

Összeszerelés

1. Csatlakoztassa az orrpárnákat a interfész vázán lévő rögzítőkapocshoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy orrpárnák háromszög alakú nyílása és a váz nyílása lefelé nézzen.
2. Az orrpárnák a megfelelő helyzetben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a váz és az orrpárnák szorosan és hézagmentesen illeszkednek-e.
3. Fűzze át a fejpánt két oldalsó szíját a panelen lévő nyílásokon egyenként, majd rögzítse azokat visszahajtva.

A P2 interfész otthoni tisztítása

Megjegyzések:

- *A interfész tisztítását megelőzően mosson kezet.*
- *A interfész első használatát megelőzően mossa ki a fejpántot, mivel annak festékanyaga foghat. Fontos, hogy a fejpántot minden esetben kézzel mossa ki.*

Naponta / minden egyes használatot követően

- Szerelje szét a interfész részeit a szétszerelési utasítások szerint.
- A (fejpánt kivételével) tisztítsa meg a interfész minden egyes részét alaposan, enyhén mosószeres, meleg (kb. 30°C-os) vízben történő gyengéd 10 percg tartó dörzsöléssel.
- Használjon puha sörtéjű kefé a szellőzőnyílás megtisztításához.
- A Bal és Jobb panelek kivételével, öblítse át az összes alkatrészt ivóvízben és hagyja azokat a közvetlen napfénytől óvva, a levegőn megszáradni.
- Amint minden alkatrész megszáradt, szerelje ismét össze az interfészt az összeszerelési utasításoknak megfelelően.

Hetente

Mossa át kézzel a fejpántot és a interfész minden egyes elemét enyhén mosószeres, meleg (kb. 30°C-os) vízben 10 percen keresztül. Öblítse át az összes alkatrészt és hagyja azokat a közvetlen napfénytől óvva, a levegőn megszáradni.



FIGYELEM

- Minden esetben kövesse az előírt tisztításra vonatkozó utasításokat és ne használjon fehérítőt, klórt, alkoholt, illatanyagokat, hidratálószeret, antibakteriális szereket vagy illatosított olajokat tartalmazó oldatokat a interfész, légvezeték bármely részének tisztításakor, mivel azok a interfész károsodását okozhatják.

- A rendszer bármely elemének vagy a csővezetékeknek a közvetlen napfénynek való kitétele az eszköz károsodásához vezethet.
- Amennyiben a interfész valamely alkatrészén nyilvánvaló sérülést (törést, repedést, szakadást, stb.) észlel, akkor az adott alkatrészt le kell selejtezni és ki kell cserélni.

Betegek közötti újrahaznosítás

Amennyiben a interfészt több beteg között megosztva használják, akkor azt regenerálni kell az egyes használatba vételeket megelőzően. A tisztítási és fertőtlenítésre vonatkozó utasítások elérhetők a BMC weboldalán, www.bmc-medical.com. Amennyiben nem rendelkezik Internet eléréssel, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ön BMC képviselőjével.

Tárolás

Győződjön meg arról, hogy a interfész alaposan kitisztította és megszáritotta, még mielőtt azt hosszabb időre eltenné. A interfész száraz helyen, a közvetlen napfénytől védve tárolja.


Megjegyzés: A interfész nem tartalmaz PVC-t, DEHP-t illetve ftalátokat.

Ártalmatlanítás

Az P2 interfész nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot az a rendes háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Műszaki specifikációk

**Nyomás-Áramlás
görbe**

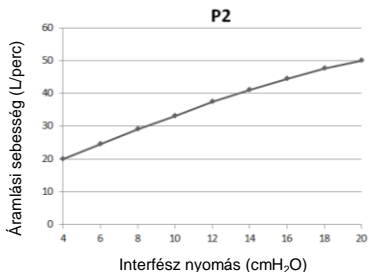

Nyomás (cmH ₂ O)	4	8	10	12	16	18	20
Áramlási sebesség (L/perc)	20	29	33	38	45	48	50

**Holttérre
vonatkozó
információ**

A holttér az orrpárna és a rövid csőszerelevény csuklórészig terjedő részének üres térfogata. A P2 interfész holttere nagyméretű orrpárnákkal 92 ml.

**Terápiás
nyomás**

4 - 20 cmH₂O.

Ellenállás

Mért nyomásesés (átlagosan a 3 orrpárna méretre)
50 L/perc értéknél: 0,5 cmH₂O; 100 L/perc értéknél: 1,6 cmH₂O

Zaj	IGAZOLT KETTŐS ZAJKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK az ISO 4871 szabvány szerint. A interfész A-súlyozott hangnyomásszintje 28 dBA±3 dBA. A interfész A-súlyozott hangnyomásszintje 1 méteres távolságból 20 dBA±3 dBA.
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet: +5°C - +40°C Üzemi páratartalom: 0% ~ 93% relatív páratartalom, nem kondenzáló Tárolás és szállítás: -20°C - +55°C Tárolási és szállítási páratartalom: 0% ~ 93% relatív páratartalom, nem kondenzáló

Szimbólumok

Rendszer és csomagolás

Figyelem, lásd a mellékelt dokumentumokat.



Egy figyelmeztetésre vagy egy esetleges sérülésre hívja fel a figyelmét illetve az eszköz biztonságos és hatékony használatára vonatkozó különleges intézkedéseket magyarázza el.



Tétel száma



Katalógus szám



Hőmérsékletre vonatkozó határértékek



Páratartalomra vonatkozó határértékek



Gyártó



Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben

Korlátozott garancia

A fogyasztónak történő első értékesítés időpontjától számítottan kilencven (90) napig garantáljuk, hogy a P2 orrpárna interfész, beleértve annak részegységei, váza, orrpárnája, fejpántja, csővezetéke és egyéb tartozékai gyártási és anyaghibáktól mentes. Garanciális jogainak érvényesítéséhez forduljon a hivatalos helyi forgalmazójához.

Az P2 orrpárna interfész várható élettartama 1 év.

GYÁRTÓ:**BMC MEDICAL CO., LTD.**

Room 110 Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian,
100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Telefon: +86-10-51663880

Telefax: +86-10-51663880 Mell.: 810

MEGHATALMAZOTT KÉPVISELET AZ EU-BAN:**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Németország

Telefon: 0049-40-2513175

Telefax: 0049-40-255726

Kiadás dátuma: 2018. november 13.

